

## Ghid de Utilizare – [Plasma Pen Total Pro Beauty](#)

### Ce conține pachetul:

- 1x Aparat Plasma Pen Total Pro Beauty cu ecran LCD
- 1x Lampa sterilizare/iluminare
- 1x Cub de gheață inox pentru calmarea pielii
- 2x Șervețele antiseptice
- 5x Ace fine (pentru precizie)
- 1x Manual de utilizare

### Beneficiile utilizării Plasma Pen Total Pro Beauty:

- Îndepărtează cu precizie petele pigmentare, pistruii și alunițele superficiale
- Reduce vizibil cicatricile post-acneice și ridurile fine
- Oferă efect de lifting neinvaziv pentru pleoape și conturul feței
- Tratează eficient negii, keratozele, semnele și tatuajele superficiale
- Aparat portabil, cu baterie reîncărcabilă și 9 trepte de intensitate
- Rezultate vizibile în 1-3 ședințe, în funcție de tipul de afecțiune

### Instrucțiuni de utilizare:

1. Curățați zona de tratat cu un șervețel antiseptic din pachet.
2. Porniți dispozitivul apăsând butonul ON/OFF și selectați treapta de intensitate potrivită (începătorii sunt sfătuiți să înceapă cu nivelul 1-2).
3. Alegeți acul corespunzător în funcție de procedură și fixați-l ferm.
4. Aplicați vârful aparatului perpendicular pe zona dorită, fără a apăsa excesiv. Utilizați mișcări rapide și precise.
5. După tratament, calmați pielea cu cubul de gheață din inox.
6. Evitați soarele direct și aplicarea de produse iritante timp de 24-48h.
7. Nu umeziți zona tratată cel puțin 12 ore.

### Recomandări:

- Nu utilizați pe piele iritată, inflamată sau infectată.
- Nu utilizați pe alunițe neregulate sau suspecte, fără consult medical.
- Fiecare ac este de unică folosință – nu reutilizați!
- Dispozitivul trebuie păstrat într-un loc uscat și curat, ferit de copii.

### Disclaimer / Atentionari:

Aparatul Plasma Pen Total Pro Beauty este destinat uzului profesional. Utilizarea sa implică riscuri dacă nu este realizată de către persoane calificate, cum ar fi specialiști în estetică, dermatologi sau cadre medicale. Nu este recomandat pentru uz casnic fără instruire corespunzătoare.

**Total Pro Beauty** nu își asumă răspunderea pentru daune cauzate de folosirea incorectă a produsului sau fără consiliere de specialitate.

 Data ultimei actualizări ghid: 24.04.2025

 Contact Suport: [office@tpb.ro](mailto:office@tpb.ro) | [www.tpb.ro](http://www.tpb.ro)