

## Instrucțiuni de utilizare – Sterilizator Pupinel Profesional CH<sup>®</sup> 360T

### 1. Destinația aparatului

Sterilizatorul Pupinel CH<sup>®</sup> 360T este conceput pentru sterilizarea uscată a instrumentelor metalice și din sticlă utilizate în saloane de înfrumusețare, cabinete cosmetice și spații medicale. Nu necesită avizul Ministerului Sănătății pentru utilizare.

### 2. Caracteristici tehnice relevante

Volum intern: 1.8 L

Interval temperatură: 20–200°C

Timer reglabil: 0–120 minute

Dimensiuni exterioare: 31 × 18 × 19 cm

Putere: 300 W

### 3. Pregătirea pentru utilizare

- Așază aparatul pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la temperatură.
- Asigură-te că zona este bine ventilată.
- Conectează aparatul la o priză compatibilă (220–240V / 50Hz).
- Verifică tava și cuva interioară să fie curate și uscate.
- Asigură-te că instrumentele sunt curățate și degresate înainte de sterilizare (sterilizarea nu înlocuiește curățarea).

### 4. Ce instrumente pot fi sterilizate

- ✓ Oțel inoxidabil
- ✓ Aliaje Fe<sup>®</sup> C
- ✓ Instrumente metalice diverse
- ✓ Sticlă
- X NU se introduc materiale termolabile: plastic, cauciuc, lemn, textile.

### 5. Procedura de sterilizare

#### Pasul 1 – Încărcarea cuvei

Așază instrumentele în tava metalică, fără a le suprapune excesiv.

Introdu tava în cuva interioară a pupinelului.

#### Pasul 2 – Setarea temperaturii

Selectează temperatura dorită în funcție de protocolul salonului (uzual 160–200°C pentru sterilizare uscată).

Nu depăși temperatura maximă admisă de instrumente.

#### Pasul 3 – Setarea timpului

Reglează timerul până la 120 minute, în funcție de necesități.

Pentru sterilizare completă, se recomandă cicluri între 45–120 minute, în funcție de temperatură.

### Pasul 4 – Pornirea aparatului

Pornește pupinelul.

Aparatul va menține temperatura setată pe toată durata ciclului.

### Pasul 5 – Finalizarea ciclului

Așteaptă oprirea automată a timerului.

Deschide capacul doar după ce temperatura scade, pentru a evita arsurile.

Scoate instrumentele cu grijă și lasă-le să se răcească complet.

### 6. Recomandări de siguranță

Nu atinge suprafețele metalice în timpul funcționării – pot atinge peste 200°C.

Nu lăsa aparatul nesupravegheat în timpul ciclului.

Nu utiliza aparatul dacă cablul sau carcasa prezintă deteriorări.

Nu introduce lichide în interiorul cuvei.

Nu bloca orificiile de ventilație.

### 7. Întreținere și curățare

Deconectează aparatul înainte de curățare.

Curăță tava și cuva interioară cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă.

Nu folosi detergenți abrazivi sau substanțe corozive.

Verifică periodic funcționarea timerului și a termostatului.

### 8. Depozitare

Păstrează aparatul într-un loc uscat, ferit de praf și umezeală.

Nu depozita instrumente în interiorul pupinelului atunci când nu este în funcțiune.

### 9. Întrebări frecvente

Este avizat de Ministerul Sănătății?

Nu, acest model nu necesită aviz MS.

Ce instrumente pot fi sterilizate?

Instrumente metalice și din sticlă, rezistente la temperaturi înalte.

Produs distribuit de: **SC Team Player Business SRL**

prin magazinul online **Total Pro Beauty** [www.tpb.ro](http://www.tpb.ro)

Telefon 0785-228.009, email: [office@tpb.ro](mailto:office@tpb.ro)